

SENSOVISC 75 mg

Intraartikulyar istifadə üçün 2.5% natrium hialuronat

TƏRKİBİ

Natrium hialuronat - 75 mg/ml, natrium xlorid, natrium-dihidrofosfat dihidrat, dibazik natrium fosfat dodekahidrat, WFI dərəcəli su.

İSTİFADƏ ÜSULLARI

SENSOVISC inyeksiyasından əvvəl hər hansı bir oynaq effüziyasını aradan qaldırın; effüziyanın aradan qaldırılması və SENSOVISC inyeksiyası üçün eyni iynədən istifadə edilməlidir. Şprisin qoruyucu qapağını çıxararkən açılan yerlə təmasdan qaçmağa xüsusilə diqqət edin.

GÖSTƏRİŞLƏR

SENSOVISC viskoelastik və sürtkü xassələri sayəsində degenerativ və ya travma sonrası şəraitdə dəyişikliyə uğrayan oynaqların reoloji vəziyyətinin bərpasına kömək edən sinovial maye əvəzedicisidir. Sinovial mayenin xüsusiyyətlərini yaxşılaşdıran məhsul oynaqların qoruyucu hərəkətinə təsir edir, birgə funksiyanın yaxşılaşdırılmasına və ağrı əlamətlərinin azalmasına kömək edir. SENSOVISC yalnız hər hansı sistemli həuəkətinə təsir etmədən dərmanın yeridildiyi oynaqda hərəkət edir.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR

SENSOVISC iynəsinin qəbulundan sonra ağrı, sərtlik, istilik, qızartı və şişmə kimi bəzi müvəqqəti yan təsirlər ola bilər. Bu kənar təzahürləri müalicə olunmuş nahiyyəyə buz tətbiq etməklə yüngülləşdirmək olar. Adətən bu təsirlər qısa bir müddət davam edir. Uzun müddət davam edərsə həkimə müraciət edin. SENSOVISC infeksiyası ilə əlaqədar istənilən yan təsirlər həkimə bildirilməlidir.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR

SENSOVISC-i hamilə və ya laktasiya dövründə olan qadınlarda istifadə etmək olmaz.

BURAXILIŞ FORMASI

SENSOVISC 3 ml qeyri-filogenik gel ilə əvvəlcədən doldurulan şpris.

Marketed by:



Səməd Vurğun küç. ev 184 B

012 449 94 71

www.bmed.az